

## **UCS® Debridement - UCSol™ Debridement**

### **Návod na použitie**

Sterilný, vopred navlhčený systém pre debridement a čistenie oblastí okolo lézií. Vhodné na diabetické vrede, venózne / arteriálne / zmiešané vrede, dekubity. Účinné pri odstraňovaní zvyškov rany, nekrotického materiálu, mŕtveho tkaniva, exsudátu, fibrínu, biofilmu. Účinné na hyperkeratotické tkanivo.

### **Predajná jednotka:**

Vopred navlhčené gázy / rukavice alebo fľaše, každá 150 ml alebo 500 ml.

### **Rozmery:**

Rozmery gázy: 20x20cm  
Veľkosť fľaše: 150ml, 500ml  
Veľkosť rukavice: 22x16cm

**Výrobca:** Welcare Research S.r.l., Via San Giovanni sul Muro 18, 20121 Miláno, Taliansko.

Zdravotnícke pomôcky triedy IIb – Sterilné

**Vlastnosti:** Bezbolestné a netraumatické odstránenie nekrotického tkaniva, fibrínu, mŕtveho tkaniva, exsudátu, biofilmu. Hydratuje oblasť okolo lézií. Počas čistiacej procedúry nespôsobuje krvácanie.

Rýchla činnosť:

Kompatibilné so všetkými krytiami, vrátane interaktívneho krytia.

### **Návod na použitie pre debridement, čistenie, oplachovanie a zvlhčovanie akútnych a chronických kožných rán:**

Chronické rany sú zvyčajne pokryté odlupovanou kožou, nekrotickým tkanivom, exsudátom a/alebo biofilmom.

Tieto povlaky sa veľmi ťažko odstraňujú a spomaľujú hojenie rany.

Akútne rany sú vo všeobecnosti kontaminované cudzími telesami, úlomkami a mikroorganizmami. Táto kontaminácia narúša normálny proces hojenia rán.

UCS® Debridement a UCSol™ Debridement sú obzvlášť účinné pri čistení tkaniva rany a pri odstraňovaní biofilmu, čím bránia jeho opätovnému vzniku.

Pri používaní tradičných alebo moderných krytí neboli pozorované žiadne nekompatibility.

### **Oblasť použitia:**

Čistenie, zvlhčovanie a dekontaminácia:

Akútnych rán;  
Chronických rán;  
Popálenín 1. a 2. stupňa;  
Fistuly a abscesy;  
Peristomálna koža;  
Vstupné otvory katétrov, PEG/PEJ, drenážne hadičky.

Pred previazaním rany kompresnými obväzmi, gázami, vankúšikmi, gémi, hydrovláknami, alginátmi, hydrokoloidmi a všetkými modernými krytiami vrátane „interaktívnych“ krytí.

Odstránenie inkrustovaných obväzov alebo iných inkrustovaných krytí z rany.

Použite UCS® Debridement utierku alebo namočte gázový tampón do roztoku UCSol™ Debridement. Prípadne nastriekajte UCSol™ Debridement priamo na ranu. Roztok neriediť.

Odporúča sa dôkladné čistenie veľkej oblasti okolo celého miesta rany, aby sa minimalizovalo riziko prenosu choroboplodných zárodkov do rany. UCS® Debridement a UCSol™ Debridement pôsobia okamžite.

Ak sa obväz prilepí na povrch rany, nastriekajte na neho prípravok UCSol™ Debridement a obväz jemne odstráňte.

### **Tkanivová znášanlivosť a biokompatibilita:**

Nedráždi, je bezbolestný, bez inhibície granulácie a epitelizácie.

Neinteraguje so žiadnym iným aktuálnym produktom.

### **Všeobecné bezpečnostné pokyny:**

Len na vonkajšie použitie na rany. Používajte len nepoškodené obaly alebo fľaše. Uchovávajte mimo dosahu zdrojov tepla alebo slnečného svetla. Skladujte pri izbovej teplote.

### **Kontraindikácie:**

Nie sú známe žiadne kontraindikácie špecifické pre tento produkt.

**Zloženie:**

Extrakt z listov aloe barbadensis, alantoín, poloxamér.

**Technická informácia:** Vzhľad a vôňa: číry, bezfarebný a prakticky bez zápachu. Vodný roztok.

Skladovanie: izbová teplota.

Čas použiteľnosti UCSol™ Debridement po otvorení: štyri týždne.

Po použití gázu zlikvidujte alebo fľašu ihneď zatvorte a chráňte hornú časť fľaše pred kontamináciou alebo priamym kontaktom s ranou. Fľaše, ktoré sa dostali do kontaktu s ranou, sa musia vyhodiť po použití.

**VÝSTRAHA:** Nepoužívať na hemoragické rany.



Rev. 02 2022/06



VRECKO JE URČENÉ NA OTVÁRANIE NA STERILNOM MIESTE.

1. Odlúpnutím otvorte

2. Vyberte gázu.

alebo



Sterilné miesto

KÓD	POPIS	PREDAJNÉ JEDNOTKY
	<b>UCS® Debridement</b>	
WR95150	1 fóliové vrecko: 1 vopred navlhčená utierka. 1 krabica: 30 vreciek	1 kartón: 10 krabíc
WR95150F	1 fóliové vrecko: 1 vopred navlhčená utierka. 1 krabica: 10 vreciek	1 kartón: 30 krabíc
	<b>UCS® Glove Debridement</b>	
WR95150M	1 krabica: 5 fóliových vreciek – 1 vrecko: 1 rukavica	1 kartón: 13 krabíc
	<b>UCSol™ Debridement</b>	
WR95160	1 fľaša: 150ml	1 krabica: 12 fliaš
WR95170	1 fľaša: 500ml	1 krabica 12 fliaš

 **Welcare Research S.r.l.**  
Via San Giovanni sul Muro, 18  
20121 - Milano – Italia  
[www.welcareindustries.com](http://www.welcareindustries.com)

**Distribútor pre SR:**

**PHARMACARE SLOVAKIA, s.r.o.**

Cabaj 504

951 17 Cabaj – Čápor, Slovenská republika

Tel: 037/658 00 66, 0948 552 289

[info@pharmacare.sk](mailto:info@pharmacare.sk)

[www.pharmacare.sk](http://www.pharmacare.sk)